

あゆみ保育園プロジェクト 第11弾のお知らせ

あゆみ保育園プロジェクト第11弾として、2月から「Look-mee ルクミー午睡チェック」を「0歳児クラス」に導入いたします。

園生活の「お昼寝」の時間に、この「Look-mee ルクミー午睡チェック」を導入する事で、これまで以上に、園児達の安全管理の徹底に努めていきたいと思っております。

※「Look-mee ルクミー午睡チェック」とは、赤ちゃんの動きが止まったり、うつぶせ状態になった場合、アラームが鳴り危険を知らせる機能を備えた「午睡センサー」です。

Look-mee ルクミー 午睡チェック — 安心を作る3つの機能 —

- ①従来のマット型には出来ない「うつ伏せ寝」も検知
- ②うつ伏せ寝の場合、20秒経過で「アラーム」がなります
- ③体動(呼吸)が停止した場合、60秒経過で「アラーム」がなります

— 安心をつくる3つの機能 —






【午睡センサー】

- 01 従来のマット型には出来ない「うつぶせ寝」も検知
お昼寝中は随時モニタリングし、子ども一人ひとりの体動の停止やうつぶせ寝の状態を警告します。
- 02 保育園専用サービスの中で唯一の自動記録機能
特許出願済(※申請番号:PP01212PCT) 保育士の手書きによる作業負担を軽減します。
- 03 見守る目をさらに増やす遠隔確認機能
例えば、園長が職員室や外出先でも、各クラスの午睡チェック状況をパソコン上で確認できます。

ルクミー午睡チェックは、睡眠中の子どもたちを見守る
保育園専用の午睡チェックサービスです。

ルクミー午睡チェックの3つのポイント

- ポイント 1 マット式にはできない「うつ伏せ寝」を検知

「うつ伏せ寝」や「体動停止」を検知したら、アラートですぐに先生たちにお伝えします。
- ポイント 2 からだの向きをチェック表に自動記録&出力

からだの向きをチェック表に自動記録し、保育士の手書き業務を軽減します。チェック表はデータ・紙で出力できます。
- ポイント 3 医療機器として届け出済み

午睡センサーはクラス1の医療機器として、品質を確認しています。※一般医療機器 医療機器届出番号:1381X10140017300

●ルクミー午睡チェックの特徴 (ボタン式と一般的なマット式との比較 ※当社調べ)

一般的なマット式と比較した場合のルクミー午睡チェック(ボタン式)の特徴は、体動の検知はもちろんのこと、うつ伏せ寝の検知、およびからだの向きをチェック表に自動記録できる点です。

利用時の流れ

- ① センサー取り付け
園児の肌着もしくはパジャマに取り付け
- ② 専用アプリで午睡チェック
からだの向きを自動で記録し、うつ伏せ寝や体動停止はアラートでお知らせ
- ③ チェックシート印刷
プリント出力して、監査書類として利用

取り付け簡単!



※チェック結果を記録するツールとして、保育園で利用することが差し支えないことを確認済み(20160928経第一号)